

KUNDENINFO

Smiths Medical Deutschland GmbH - Bretonischer Ring 3 - D-85630 Grasbrunn

Smiths Medical Deutschland GmbH
www.smiths-medical.com
IK 330913435

Bretonischer Ring 3 D-85630 Grasbrunn
Tel: +49 (0) 89 24 29 59 0 Fax: +49 (0) 89 24 29 59 100
Werdauer Straße 51 D-08427 Fraureuth
Tel: +49 (0) 37 61 18 89 0 Fax: +49 (0) 37 61 18 89 10

Gigasept AF 2 %

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gigasept AF 2% ist ein Reinigungs- und Desinfektionsmittel der Firma Schülke & Mayr, das bei der Reinigung von Medizinprodukten breite Anwendung findet. Eine Untersuchung des Herstellers zeigt, dass das Mittel mit Polyethylen kompatibel ist (tatsächlich wird Gigasept in Polyethylenbehältern geliefert). Daher kann es zur Reinigung/Desinfektion der Innenkanülen der folgenden Produkte von Smiths Medical verwendet werden:

100/850/060-100 INNENKANÜLE 6-10 MM, UNGEFENSTERT, BLUE LINE ULTRA
100/851/060-100 INNENKANÜLE 6-10 MM, GEFENSTERT, BLUE LINE ULTRA
100/800/060-100 BLUE LINE ULTRA TRACHEOSTOMIEKANÜLE 6-10 MM, SOFT SEAL CUFF
100/802/060-100 B/L ULTRA TRACHEOSTOMIETUBUS 6-10 MM, SOFT SEAL, GEFENSTERT
100/810/060-100 B/L ULTRA TRACHEOSTOMIETUBUS 6-10 MM, SOFT S., WEICHE INNENKAN.
100/811/060-100 B/L ULTRA TRACHEOSTOMIE-SET, OHNE MANSCHETTE
100/812/060-100 B/L ULTRA TRACHEOSTOMIETUBUS 6-10 MM, SOFT SEAL, GEF., INNENKAN.
100/813/060-100 B/L ULTRA TRACHEOSTOMIETUBUS 6-10 MM, OHNE MANSCH., GEF., INNENK.
100/860/060-100 B/L ULTRA SUCTIONAID
100/870/060-100 B/L ULTRA SUCTIONAID TRACHEOSTOMIE-SET, SOFT SEAL, INNENKANÜLE

Wird das Mittel zur Reinigung der Innenkanüle verwendet, sind die dem Produkt beiliegenden Hinweise der Firma Schülke & Mayr einzuhalten. Zudem muss – wie bei allen Desinfektionsmitteln – darauf geachtet werden, dass die Innenkanüle vor dem Wiedereinsetzen in den Tracheostomietubus sorgfältig ab gespült wird.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Smiths Medical Team