

ETI-PR1500025 29/04/10
ALT: ----
FORMAT (mm): 148 x 105

<input type="checkbox"/>	SCHWARZ	06/11/09
<input checked="" type="checkbox"/>	PANTONE 300	29/04/10
<input type="checkbox"/>	PANTONE 021	06/11/09
<input type="checkbox"/>	PANTONE 368	06/11/09

Korrektur
 unverändert

 Servoclean

Kanülenreinigungs- und Desinfektionsmittel Konzentrat

VAH/
DGHM-
geprüft

- Reinigungsstark
- Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, sporizid
- Viruzid (HBV, HIV, Vaccinia, Adeno-, Papova-, Polio-Viren)

Anwendungshinweise:

Desinfektion und Reinigung
von Trachealkanülen

Konzentration und Anwendungsdauer:

2% – 15 Minuten (nur verdünnt anwenden)

Dosierungsanleitung und Anwendung:

Zum Ansetzen der Reinigungs- und Desinfektionslösung geben Sie 6 ml Konzentrat mittels beiliegendem Medizinbecher in eine 300 ml Kanülenreinigungsdose, füllen diese mit 300 ml lauwarmem Wasser auf und mischen die Lösung gründlich durch. Legen Sie die vorgereinigte Außen- und/oder Innenkanüle in den Siebeinsatz der Kanülenreinigungsdose und tauchen dies für 15 Min in die Reinigungs- und Desinfektionslösung.

Danach nehmen Sie den Siebeinsatz mit der Trachealkanüle heraus und spülen diese gründlich mit reichlich klarem lauwarmem Wasser. Trocknen Sie die Trachealkanüle mit einem weichen fusselfreien Baumwolltuch außen und innen ab. Beachten Sie unbedingt die Hinweise des Kanülenherstellers zur Reinigung, Desinfektion und Pflege der Trachealkanülen. Die Reinigungs-/Desinfektionslösung ist nach 24 Stunden zu verwerfen.



Uns verbindet Gesundheit.

Zusammensetzung:

in 100 g sind enthalten: Glutaral 12,0 g. Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar gem. EU- Detergenzienverordnung.

Kenzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung:

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. Verursacht Verätzungen. Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. Dampf nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Berührung mit der Haut und Berührung mit Textilien vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett zeigen). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Medizinbecher transparent
30 ml REF 25052) – Hersteller:
Hammar-plast-Länden AB,
SE-53102 Lidköping 



Inhalt 250 ml

 Ch.-B.:

 Verv. bis:

UN 1903

REF 24472   0197

Servona GmbH
Biberweg 24-26
53842 Troisdorf | GERMANY

Tel. 0 22 41.93 22-0
Fax 0 22 41.93 22-777
info@servona.de | www.servona.de

24472/0911