

- > sehr weiches Polster mit Baumwollummantelung, Dekubitusschutz
- > latexfrei, hypoallergen, atmungsaktiv, leicht absorbierend
- > formstabil, auch bei längerer Tragezeit
- > *soft padding due to cotton coating, decubitus prophylaxis*
- > *latexfree, hypoallergenic, slightly absorptive, breathable padding*
- > *dimensionally stable, even with long-term use*

www.its-novo.de



Novo Klinik-Service GmbH · Alte Landstraße 3 · D - 50171 Kerpen · Tel. +49 (0)2237 6393-0 · Fax -30

Benötigen Sie eine andere Länge? Sprechen Sie uns an!
Are you in need of a customised length? Just contact us!

wahlweise Haken- (H) oder Kletthalterung (K),
 in Polsterlängen 18 cm, 25 cm, 30 cm, 36 cm
 optionally hook (H) or hook and loop (K) fastener,
 with padding lengths 18 cm, 25 cm, 30 cm, 36 cm

REF 100 502 PZN 476 4220
 25 cm Polster, Klett, längenvariabel 30 - 45 cm
 25 cm padding, hook and loop, variability 30 - 45 cm




BePa-Clip® VARIO 25/K

BePa-Clip® VARIO 25/K

Einteiliges Halteband für Trachealkanülen, Klett
One-piece Tracheostomy Tube Holder, hook and loop

ITS NOVO
 Novo Klinik-Service GmbH

Gebrauchsanweisung / Instructions For Use

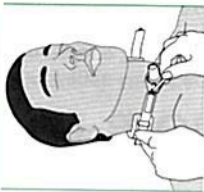

Legen Sie das Band in den Nacken des Patienten.
Führen Sie auf einer Seite den Klett durch die Öffnung
am Kanülenschild. Befestigen Sie ihn auf dem Flausch.

*Place the tube holder around the patient's neck.
On one side conduct the hook and loop fastener through
the slot of the tracheostomy plate and fix it.*



Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

Repeat this procedure on the other side.



Stellen Sie ggf. die individuelle Tragelänge mittels der
Schieber am Gummiband ein.

*If necessary, adjust the individual length by displacing the
plastic sliders.*