

## Reinigung und Desinfektion

um eine Gesundheitsgefährdung durch verunreinigte Materialien zu vermeiden, sind nachfolgende Hygienemaßnahmen unbedingt einzuhalten:

### Hygiene zu Hause

- zur Optimierung der Hygiene sollten die Gänsegurgel und das T-Stück mit Ventil (in Einzelteile zerlegt) ca. 10 Minuten ausgekocht werden oder im Vaporisor sterilisiert werden.
- Achten Sie darauf, dass die Teile beim Auskochen nicht mit dem heißen Topfboden in Berührung kommen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile anschließend vollständig abtrocknen.

### Hygiene in Klinik und Arztpaxis

Das **Tracheostoma-Set** darf nur nach Reinigung und Desinfektion mit einem geprüften Desinfektions- bzw. Sterilisationsverfahren bei mehreren Patienten eingesetzt werden, ist dies nicht möglich, darf das Set nicht wieder bei einem weiteren Patienten eingesetzt werden.

Es stehen folgende Möglichkeiten der Desinfektion zur Verfügung:

- Autoklavieren bei 134°C
- Plasmasterilisation
- Chemothermische Desinfektion 60°C, 10 min (Gummiprogramm)


### Aufbewahrung

Schlagen Sie die Teile zwischen den Anwendungen, insbesondere bei längeren Therapiepausen, in ein sauberes, fusselfreies Tuch ein und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

Die Hinweise zur Reinigung und Desinfektion des jeweils verwendeten Inhalationsgerätes entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des selben.

Artikel-Nr.: 83220

€ 0494

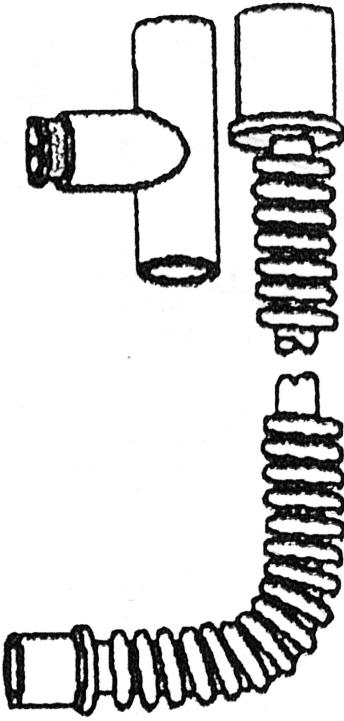

(Mehrwegprodukt)



# Gebrauchsanweisung

## Inhalationsbehandlung von Tracheostoma-Patienten

### Wichtige Hinweise:

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.  
Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung des entsprechenden Verneblers, mit dem Sie das **Tracheostoma-Set** kombinieren.

### Lieferumfang:

1 Stück Silikon-Gänsegurgel 20 cm



1 Stück T-Stück mit Ausatem-Ventil (Polypropylen)



Bitte prüfen Sie, ob alle abgebildeten Komponenten im Lieferumfang enthalten sind.


### Zweckbestimmung:

Das Tracheostoma-Set ermöglicht eine Inhalationstherapie mit Flores-Inhalationssystemen (z.Bspiel "multisonic infraControl® und aerosonic Combinerb®) für tracheostomierte Patienten.

Das Tracheostoma-Set ist zur mehrmaligen Verwendung konzipiert.  
Ein Patientenwechsel wird nicht empfohlen.


Verwenden Sie das **Tracheostoma-Set** mit dem jeweiligen Vernebler wie in den folgenden Abbildungen dargestellt:

### Liegende Patienten 22M

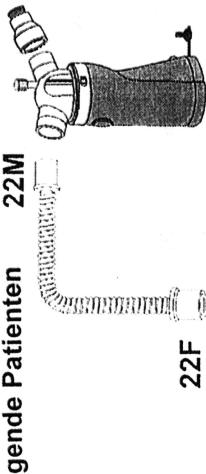


22F

T-Stück  
Art. Nr. 85776

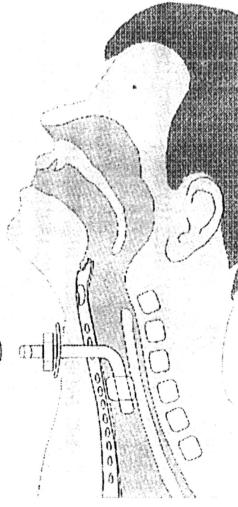


### Sitzende Patienten

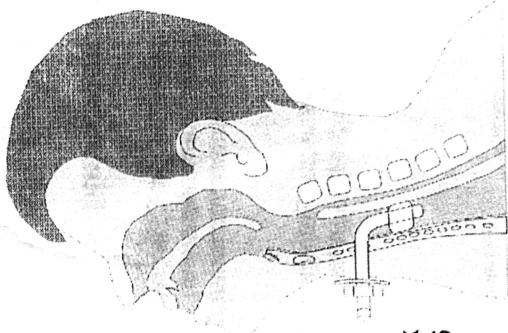

### E-Ventil-Adapter

83055

22M

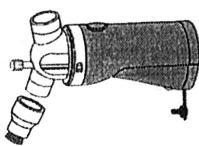

22F

T-Stück  
Art. Nr. 85776