

## Inogen One G3 Rucksack - Anweisungen



1. Öffnen Sie die obere Hälfte des Rucksacks und entfernen Sie die das Füllmaterial, wenn Sie einen großen Akku (16 Cell) verwenden möchten. Bei Verwendung von einer kleinen Akku (8 Cell), entfernen Sie das Füllmaterial nicht.



2. Fügen Sie den Inogen One G3 Konzentrator in den Rucksack ein und befestigen Sie das Fixierband. Überprüfen Sie, ob sich der Konzentrator in der richtigen Position befindet. Die richtige Position ist gegeben, wenn Sie durch das Kunststoff-Fenster auf der Oberseite des Rucksacks den Bildschirm einwandfrei sehen können.



3. Schließen Sie den Rucksack mit dem Reißverschluss.



4. Ziehen Sie die Nasenbrille durch die Aussparung an der Oberseite des Rucksacks und Schließen Sie den Nasenbrillenanschluss am Sauerstoffauslass des Gerätes an.

## Inogen One G3 Rucksack - Anweisungen



5. Stellen Sie sicher, dass die Öffnungen nicht blockiert sind. Ebenfalls finden Sie an der Oberseite des Rucksacks eine Aussparung für den Anschluss einer externen Stromquelle.



6. Das untere Bodenfach des Rucksacks ist für zusätzliches Zubehör.



7. Probieren Sie den Rucksack an. Sie können die Passform durch Ziehen der Schultergurte individuell anpassen (der optionale Gurt kann entfernt werden).



8. Schnallen und ziehen Sie den Gürtel an für die richtige Passform (optionale Gürtel kann entfernt werden).