

Das abnehmbare Akkumodul von Philips Respirationics kann verwendet werden, um Ihr BiPAP A40 Gerät mit einem abnehmbaren Lithium-Ionen-Akku zu betreiben. Wenn der abnehmbare Akku in das Modul eingelegt und mit dem BiPAP A40 verbunden ist, wird er automatisch aufgeladen. Weitere Informationen zum abnehmbaren Akku entnehmen Sie bitte den Anweisungen, die dem abnehmbaren Akkupack beiliegen.

Vorsichtshinweise:


- Das Gehäuse des abnehmbaren Akkumoduls darf nicht geöffnet werden. Es enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile.
- Schützen Sie das abnehmbare Akkumodul vor Wasser und leitfähigen Flüssigkeiten. Das Gehäuse ist nicht abgedichtet.
- Nur zur Verwendung mit den nachstehend angegebenen Lithium-Ionen-Akkus. Andere Akkutypen können explodieren und dabei Verletzungen verursachen.

Hinweis: Nur zur Verwendung mit Lithium-Ionen-Akkus von Philips Respirationics (1055804 und 1043570).

Anschluss des abnehmbaren Akkumoduls

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Akkumodul mit dem BiPAP A40 Gerät zu verbinden und den abnehmbaren Akku zu installieren:

1. Nehmen Sie die seitliche Abdeckung vom Therapiegerät ab. Drücken Sie die Lasche an der seitlichen Abdeckung ein und ziehen Sie die Abdeckung vom Gerät weg.
2. Stellen Sie das abnehmbare Akkumodul und das Therapiegerät nebeneinander auf und achten Sie darauf, dass die Passzungen am Modul in die Schlitze am Therapiegerät gleiten.
3. Drücken Sie die beiden Geräte zusammen, bis sie einrasten. Stellen Sie sicher, dass das Therapiegerät und das Akkumodul lückenlos aneinanderliegen.
4. Legen Sie den abnehmbaren Akku wie unten abgebildet bis zum Einrasten in das Akkumodul ein. Schließen Sie den Deckel am Akkumodul.

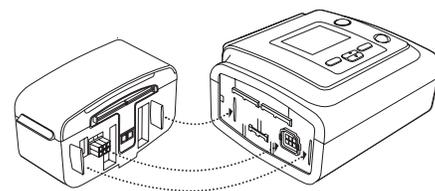

Technische Daten des abnehmbaren Akkumoduls

Kategorie	Beschreibung
Gewicht	0,425 kg
Abmessungen	9,7 cm H x 9,9 cm B x 17,3 cm L
Einhaltung von Normen	IEC 60601-1; IEC 60529; EMC: CISPR 11, EN 55022, EN 55024; EN 61000-3-3; IEEE 1625; FCC Teil 15

Symbollegende

Die folgenden Symbole sind auf dem Akkumodul vorhanden:

Symbol	Beschreibung
	Achtung, beiliegende Dokumente einsehen
	Stromeingang
	Stromausgang
	Separate Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten nach EG-Richtlinie 2002/96/EC.