

Instructions for use

JetBasic

Nebulizer



CE0123



Respironics New Jersey, Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ 07054

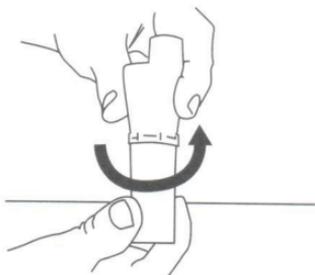
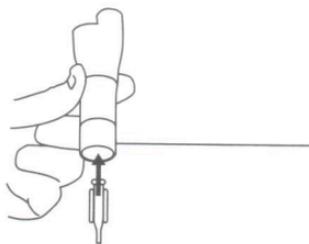
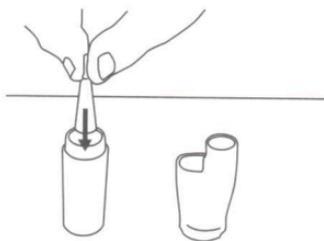
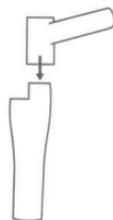
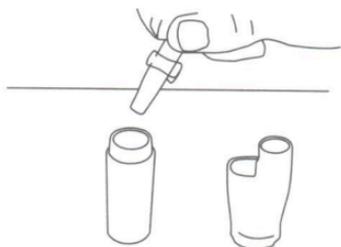
Made in China



Respironics Deutschland GmbH
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Germany

PHILIPS

RESPIRONICS

A**D****B****E****C****F**

Gebrauchsanleitung Jet Basic-Vernebler

Der Jet Basic-Vernebler ist für den Gebrauch mit folgenden Produkten vorgesehen: 90479, 90543, RDD91099, RDD91093, 91100, 91730, 91490, 90688, 90256, 90257, 90732, 91622, 91238.

Vorsichtsmaßnahmen

Wichtiger Hinweis: Lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung dieses Geräts sorgfältig durch. Wenn Sie Fragen zu oder Probleme mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Gesundheitsdienstleister oder telefonisch an den Kundendienst von Philips Respironics unter der Nummer 1-800-962-1266 (innerhalb der USA) oder +1 724-387-4000 (außerhalb der USA).

1. Den Vernebler nur in der in **dieser Gebrauchsanleitung** beschriebenen Weise nutzen. Dieses Produkt sollte nur unter Aufsicht eines Arztes oder einer zugelassenen medizinischen Fachkraft verwendet werden.
2. **Die Gebrauchsanleitung** zur späteren Bezugnahme aufbewahren.
3. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
4. Entsorgung unter Beachtung örtlich geltender Auflagen.
5. Bei Behandlungen mit diesem Gerät **die Gebrauchsanleitung** beachten.
6. Nur mit dem vom Arzt oder von einer zugelassenen medizinischen Fachkraft verschriebenen Medikament verwenden.
7. Wenn ein Nasenstück verwendet werden soll, dieses nicht in den Nasenkanal einführen. In die Nähe der Nasenöffnungen bringen und normal atmen.

Gebrauchsanleitung

1. Das Gerät auf mögliche Beschädigungen untersuchen.
2. Vor dem Gebrauch den Vernebler gemäß den Anleitungen reinigen. Diese sind im Abschnitt „Reinigungshinweise“ **dieser Gebrauchsanleitung** zu finden.
3. Den Vernebler durch Linksdrehung öffnen (Abb. A). Den Vernebler durch Rechtsdrehung verschließen.
4. Sicherstellen, dass die Prallplatte richtig in die Verneblerkammer eingesetzt wurde (Abb. B).
5. Das verschriebene Medikament in den Behälter geben (Abb. C).
6. Den Vernebler durch Rechtsdrehung der Teile fest verschließen. Sicherstellen, dass er fest verschlossen ist.

7. Ein Ende des Luftschlauchs an der Unterseite des Verneblers (Abb. D) und das andere Ende am Luftauslass des Kompressor-Inhaliergeräts anbringen.
8. Wenn die Maske oder ein Nasenstück verwendet wird, ist es nicht erforderlich, dass das angewinkelte Mundstück aufgesteckt bleibt, sondern es kann entfernt werden. Das Nasenstück bzw. die Maske direkt am Vernebler anbringen (Abb. F).
9. Die Behandlung in der in **dieser Gebrauchsanleitung** beschriebenen Weise beginnen. Nur das zur Behandlung benötigte Zubehör verwenden.
10. Nach Abschluss der Behandlung den Vernebler gemäß den Anleitungen reinigen. Diese sind im Abschnitt „Reinigungshinweise“ **dieser Gebrauchsanleitung** zu finden.

Reinigungshinweise

1. Der Vernebler und das Nasenstück können durch Ausspülen in Flüssigseife und Wasser gereinigt und dann durch Auskochen in Wasser (max. 10 Minuten) und dann Autoklavieren (bei max. 121°C) sterilisiert werden.
2. Abtropfen lassen, den Vernebler wieder zusammenbauen und am Kompressorgerät befestigen.
3. Das Gerät einschalten und etwa 5–10 Minuten laufen lassen, um die Teile zu trocknen. Dadurch sollten jegliche Rückstände beseitigt werden, die den Luft- und Medikamentenfluss behindern könnten.

 **Den Luftschlauch, die Maske oder das angewinkelte Mundstück nicht durch Kochen oder Autoklavieren sterilisieren.**

 Um eine effiziente und sichere Leistung des Produkts zu gewährleisten, ist es äußerst wichtig, dass **die Reinigungshinweise** genauestens befolgt werden.

Austausch des Verneblers

Der Vernebler sollte ersetzt werden, wenn er eine längere Zeit nicht benutzt wurde oder durch angetrocknete Reste der Medikamente, Staub usw. verstopft ist. Bei normalem Gebrauch sollte der Vernebler mindestens 6 Monate halten.

 Es sollten ausschließlich vom Hersteller gelieferte Ersatzvernebler verwendet werden.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com/respironics

PN 1066506 REV1