


Profile Lite Spezial-Nasenmaske und Kopfband sind als Patientenanschluss für erwachsene Patienten zum Gebrauch während der Respironics CPAP- bzw. Bi-level-Therapie angezeigt. Die Profile Lite Spezialnasenmaske paßt sich der Form Ihres Gesichts an. LATEXFREI

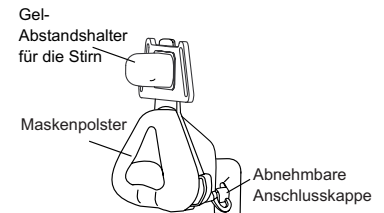

Warnhinweis: Die Profile Lite Maske ist zum Gebrauch zusammen mit den von Ihrem Arzt oder Atemtherapeuten empfohlenen CPAP- und Bi-level-Systemen konzipiert. Diese Maske nur dann tragen, wenn das CPAP- bzw. Bi-level-System eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Warnhinweis: Diese Warnung gilt für die meisten CPAP-Geräte. Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs und eines kontinuierlichen Luftstroms MUSS diese Maske zusammen mit einem Ausatemventil verwendet werden. Bei geringem CPAP ist der Luftstrom durch das Ausatemventil u.U. nicht ausreichend, um das gesamte ausgeatmete Gas (CO₂) aus der Maske zu entfernen. Es kann vorkommen, daß Sie einen Teil der ausgeatmeten Luft wieder einatmen. Die Ausatemungsschlitze am Ausatemventil DÜRFEN NICHT BLOCKIERT oder auf sonstige Weise abgedichtet werden.


Warnhinweis: Bei manchen Patienten kann es zu Hautrötungen kommen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Arzt.

Warnhinweis: Die Profile Lite Maske kann mittels kochendem Wasser neu geformt werden. Bei der Handhabung des heißen Wassers und der erhitzten Maske vorsichtig vorgehen. Vor Durchführung des Verfahrens alle Anweisungen durchlesen.


Vorsicht: Die Maske nicht in einem Mikrowellen- oder herkömmlichen Herd erhitzen. Dies führt zu Beschädigungen der Maske.

Zusammenbau: Die Maske und den Gel-Abstandshalter für die Stirn vor dem Gebrauch gemäß der folgenden Anleitung reinigen.


Schritt 1 Die Maske direkt vor das Gesicht halten und das Kopfband über den Kopf ziehen.

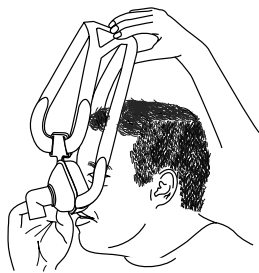

Schritt 2 Schließen Sie das Ausatemventil und den flexiblen Atemschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Maske an. Das CPAP- bzw. Bi-level-System einschalten.

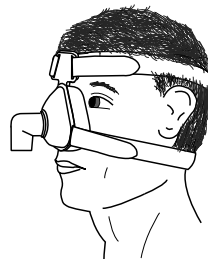

Schritt 3 Hinlegen und normal durch die Nase atmen; dabei den Mund geschlossen halten. Die Bänder aushaken und stufenweise fester ziehen, bis die Maske minimale Lecks aufweist und bequem sitzt. HINWEIS: Das Kopfband lässt sich mittels zweier Laschen-Sets für besseren Sitz anpassen. Bei größerem Kopfumfang die schwarzen Laschen verwenden. Bei kleinerem Kopfumfang die blauen Laschen verwenden. Die nicht gebrauchten Laschen können mit einer Schere abgeschnitten werden. Die Bänder NICHT ZU FEST anziehen. Zu festes Anziehen kann Lecks verursachen bzw. diese vergrößern.

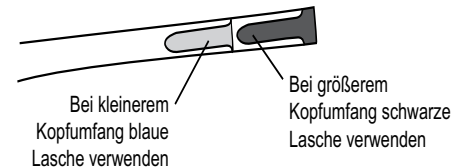

Abnehmen des Kopfbandes und der Maske:

Da sich das gesamte Kopfband dehnt, ist es normalerweise nicht notwendig, die Bänder auszuhaken, um das Kopfband abzunehmen. Einfach die Maske und das Kopfband über den Kopf streifen. Bei Bedarf eines der beiden Halsbänder lösen.

Reinigungsanleitung:

Um Anweisungen zum wiederholten Gebrauch bei mehreren Patienten zu erhalten, rufen Sie bitte Respironics an, um Sterilisations- und Desinfektionshinweise zu erhalten (Bestell-Nr. 1011138).

Für den Heimgebrauch: Alle Masken- und Abstandshalterteile täglich reinigen. Das Kopfband mindestens einmal pro Woche bzw. bei Bedarf öfter reinigen. Die Maske und das Kopfband vor dem Reinigen vom Schlauchsystem trennen. Die Laschen an den Bändern einhaken, damit sie sich in der Waschmaschine nicht in anderen Kleidungsstücken verfangen.

Maske und Gel-Abstandshalter für die Stirn

Schritt 1 Die Maske und den Abstandshalter in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel waschen. **Weder** Bleichmittel, Alkohol, Alkohol enthaltende Reinigungslösungen **noch** aggressive Haushaltsreiniger verwenden. **Keine** Reiniger verwenden, die Umhüllungs- oder Feuchthaltemittel enthalten.

Schritt 2 Gründlich ausspülen. An der Luft trocknen lassen. Sicherstellen, dass die Maske vor dem Gebrauch trocken ist. Die Maske nach dem Reinigen untersuchen. **Bei beschädigten oder abgenutzten Teilen die Maske austauschen. Bei freigelegtem Gel den Abstandshalter austauschen. Bei Hautkontakt mit dem freigelegten Gel das Gesicht mit Wasser und einer milden Seife waschen.**

Kopfband

Schritt 1 Mit einem normalen Waschmittel und warmem Wasser von Hand oder in der Maschine waschen. Gründlich ausspülen. **Kein** Bleichmittel verwenden.

Schritt 2 Zum Trocknen aufhängen oder bei mittlerer Hitze im Trockner trocknen.

HINWEIS: Nach wiederholtem Waschen ist u.U. eine leichte Neuanpassung der Bänder notwendig.


Neuformen der Maske:

OPTIONAL – Ist eine Minimierung der Lecks nicht möglich, kann die Maske wahlweise neu geformt und so dem Gesicht besser angepasst werden.

Schritt 1 Das Kopfband und den Abstandshalter von der Maske abnehmen.

Einen Behälter mit ausreichend Wasser füllen, um die gesamte Maske zu bedecken. *(Die Maske jetzt noch NICHT ins Wasser legen.)* Den Behälter auf den Herd stellen und das Wasser zum Kochen bringen.

Den Behälter von der Platte nehmen.

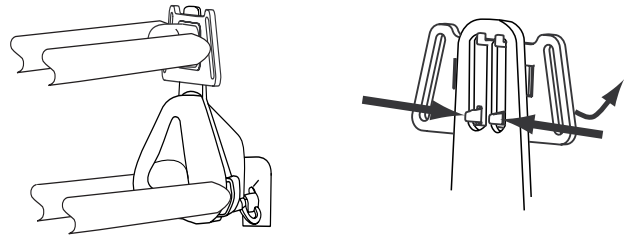


Schritt 2 Mit einer Zange o.ä. die Maske langsam ins Wasser eintauchen und dabei sorgfältig darauf achten, dass das Wasser nicht überläuft. Die Maske vier Minuten lang einweichen lassen.

Die Maske mit der Zange an der Verlängerung fassen und aus dem Wasser nehmen. Die Maske zehn Sekunden lang in kaltes Wasser legen.

Den Abstandshalter und das Kopfband wieder anbringen.


Warnhinweis: Vor dem Aufsetzen der Maske sicherstellen, dass diese ausreichend abgekühlt ist, um Hautreizungen oder Verbrennungen zu vermeiden.

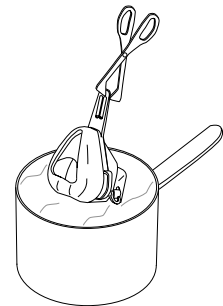

Schritt 3 Die Maske in der Position auf das Gesicht legen, in der sie getragen werden soll, und so an das Gesicht drücken, dass sie als angenehm empfunden wird. Das Kopfband über den Kopf ziehen. **HINWEIS:** Das Kopfband unbedingt so straff anziehen, wie dies normalerweise beim Tragen der Fall ist.

Maske und Kopfhaltung fünf Minuten lang tragen, damit sie sich an die Gesichtsform des Patienten anpasst.

Maske und Kopfband abnehmen. Die Maske behält ihre Form bei. **HINWEIS:** Die Maske kann bei Bedarf nachgeformt werden; siehe hierzu Schritte 1 bis 3.

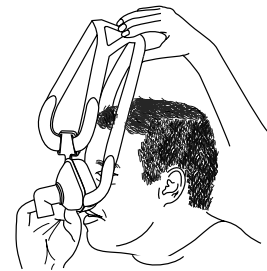

Hilfreiche Tipps für den Maskenkomfort:

- Maske und Gesicht vor jedem Gebrauch gründlich reinigen.
- Sicherstellen, dass die für das Gesicht richtige Maskengröße gewählt wurde.
- Das Kopfband nicht zu fest anziehen. Zu festes Anziehen kann zu Hautreizungen im Gesicht, vergrößerten Lecks und Schäden an der Maske führen.
- Die Maske ersetzen, wenn sich das Polster verhärtet oder verformt hat.

BESTELLNUMMERN FÜR PROFILE LITE MASKE OHNE EXPIRATIONSKNIE.

Nr.	BESCHREIBUNG	Nr.	BESCHREIBUNG
1006323	MS	1006316	mit Kopfband, MS
1006326	M	1006317	mit Kopfband, M
1006327	M, breit	1006318	mit Kopfband, M, breit
1006328	L	1006319	mit Kopfband, L
1006329	L, schmal	1006320	mit Kopfband, L, schmal
1006321	Extra klein	1006314	mit Kopfband, Extra klein
1006322	S	1006315	mit Kopfband, S
1004291	Ersatz-Gel-Abstandshalter, L		
1004292	Ersatz-Gel-Abstandshalter, S		
1008869	Ersatz-Gel-Abstandshalter, XL		
1002720	Federring-Kit (à 5 Stück)		