

## DEUTSCH

(D)

### 5. Warnhinweise

Um Verunreinigungen des SERVOX Stoma-Öls zu vermeiden ist bei dessen Anwendung eine hygienische Handhabung äußerst wichtig. Sorgen Sie daher stets für eine saubere Umgebung und waschen Sie vor der Verwendung des Öls gründlich Ihre Hände. In jedem Fall sollten Sie vermeiden, die Öffnung der Flasche mit den Fingern, einem Tuch oder der Kanüle zu berühren. Bitte verschließen Sie die angebrochene Flasche nach jeder Anwendung sorgfältig.

Das SERVOX Stoma-Öl ist ab seinem Produktionsdatum in der ungeöffneten Flasche 2 Jahre haltbar (siehe Etikett). Geöffnete Flaschen können eine verkürzte Haltbarkeit aufweisen. Sollte das SERVOX Stoma-Öl einen ranzigen Geruch entwickeln oder sich Ölflocken bilden, darf das SERVOX Stoma-Öl nicht mehr verwendet werden. Angebrochene und abgelauene Flaschen des SERVOX Stoma-Öl sollten gut verschlossen über den Hausmüll entsorgt werden.

### 6. Sicherheit

Jedem Produkt ist eine Chargennummer (LOT) zugeordnet, die auf dem Etikett angegeben ist, um eine eindeutige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Das SERVOX Stoma-Öl ist nicht zur Verwendung mit Trachealkanülen aus Silikon geeignet.

## DEUTSCH

(D)

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitliche Auswirkungen bis hin zu lebensgefährlichen Situationen zur Folge haben. Bei Missachten über Hinweise oder bei Manipulation am Produkt übernimmt der Hersteller im Schadensfall keine Haftung.

### 7. Inhaltsstoffe

Mittelkettige Triglyceride (MCT)

### 8. Bestellinformationen

Beschreibung	VE	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX Stoma-Öl	1	07308600	12345

## ENGLISH

(GB)

## DEUTSCH

(D)

# Gebrauchsanweisung SERVOX Stoma-Öl

### 1. Allgemeine Beschreibung

Das SERVOX Stoma-Öl ist ein Palmkernöl (Neutralöl), bestehend aus mittelkettigen Triglyceriden und ist zu 100 % biologisch abbaubar.

### 2. Indikation

Als Gleitmittel dient das SERVOX Stoma-Öl zur Erleichterung der Einführung von Trachealkanülen aus Kunststoff oder Silber in die Atemöffnung.

### 3. Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, dennoch sollte das SERVOX Stoma-Öl nur in sehr geringen Mengen verwendet (1 bis 2 Tropfen pro Anwendung) und niemals direkt in die Atemöffnung eingebracht werden.

### 4. Anwendung

Geben Sie vor dem Einführen der Trachealkanüle wenige Tropfen des SERVOX Stoma-Öls auf das Kanülenrohr. Verteilen Sie das SERVOX Stoma-Öl anschließend vorsichtig mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Bitte beachten Sie auch die Angaben des jeweiligen Herstellers zur Pflege der verwendeten Trachealkanüle.

CE0197       



Servona GmbH

Bibenweg 24-26 | 53842 Troisdorf | GERMANY  
Tel. +49 (0)2241 9322-477  
Fax +49 (0)2241 9322-271  
export@servona.com | www.servona.com

10185/Revision: 2016-02-23