

## Teleflex Medical GmbH

Willy-Rüsch-Str. 4–10  
71394 Kernen  
Germany

Phone: +49 (0)7151 406 0  
Fax: +49 (0)7151 406 150

[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

Geschäftsführer:  
Hans-Peter Goldmann  
Rolf Topp  
Daniel Price  
Gerry McCaffrey  
Liam Kelly

AG Stuttgart HRB 264371

USt-IdNr. DE811111620

Commerzbank AG Waiblingen

Ihr Ansprechpartner:  
Nadja Sommerfeld

Telefon:  
- 283

Fax:  
- 530

Email:  
[nadja.sommerfeld@teleflex.com](mailto:nadja.sommerfeld@teleflex.com)

Datum:  
20.05.2014

## Innenkanülen der Tracheofix Trachealkanülen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit bestätige ich, dass die Produkttests der Innenkanülen für die Tracheofix Trachealkanülen (Artikelnummern 859004, 859005, 859006, 859007) zur Funktionstauglichkeit nach diversen Reinigungszyklen und eine Reinigungsvalidierung abgeschlossen sind.

Die Reinigung der Innenkanülen sollte folgendermaßen stattfinden:

**Vorreinigung:**

Das Produkt mindestens 5 Minuten in eine neutrale Reinigungslösung einlegen.

**Reinigung:**

Das Lumen der Innenkanüle mit entsprechenden Trachealkanülen Reinigungsbürsten säubern, bis keine Rückstände mehr zu sehen sind. Anschließend mit lauwarmen, fließendem Wasser abspülen.

**(Desinfektion):**

Die Innenkanülen mindestens in 30 Minuten mit höchstens 30°C warmen, 2%-iges Sekusept Classic einlegen.

Wenn alle Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung (siehe Gebrauchsanweisung) eingehalten werden, sind bis zu 20 Wiederaufbereitungszyklen möglich.

Mit freundlichen Grüßen



i. A. Nadja Sommerfeld  
Jr. Produkmanagerin Tracheostomie Homecare  
DE/AT/CH