

RESMED

VPAP™ ST-A



GERÄT FÜR NICHT-INVASIVE BEATMUNG

Kurzanleitung






Navigieren durch die Menüs



Auswahl eines Menüeintrags

1.  drehen, um die gewünschte Option auszuwählen.
2.  drücken, um das gewünschte Menü zu akzeptieren.

Ändern von Werten im Menü

1.  drehen und drücken, um den gewünschten Wert zu wählen.
2.  drehen, um den Wert entsprechend zu ändern.
3.  drücken, um den Wert zu akzeptieren.

Es gibt zwei Möglichkeiten das Menü zu verlassen:

- Zur Menütaste scrollen und ZURÜCK (vorheriges Menü) oder START (Startbildschirm) wählen.
- Die Taste  oder  drücken, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Startseite



Die Startseite zeigt die aktivierten Funktionen sowie die Zubehörteile, die an das Gerät angeschlossen sind.



Befeuchtungsniveau wird angezeigt, wenn der H5i™ angeschlossen ist.



Climate Control wird angezeigt, wenn sowohl der H5i als auch der beheizbare ClimateLine™ Atemschlauch angeschlossen sind und Climate Control im Klinischen Setup-Menü auf Auto oder Patient eingestellt ist.



Befeuchtungsniveau und beheizbarer Atemschlauch

wird angezeigt, wenn sowohl der H5i als auch der beheizbare ClimateLine Atemschlauch angeschlossen sind und Climate Control im Klinischen Setup-Menü auf Manuell eingestellt ist.



Rampe wird angezeigt, wenn die Rampenfunktion im Klinischen Setup-Menü aktiviert ist.



Standard Info-Menü


Informationen über Compliance und Therapie inklusive Betriebsstunden.



Erweitertes Info-Menü (3 Sekunden lang gedrückt halten)


Zusätzliche Informationen zu Therapieeinstellungen und u. a. Compliance, AHI und Leckage.

Alarmer

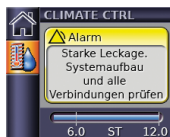

Löschen der Alarmmeldung


Wird ein Alarm ausgelöst, wird eine entsprechende Alarmmeldung angezeigt. Sind mehrere Alarme aktiv, wird die letzte Alarmmeldung angezeigt, und mit Löschen der einzelnen Meldungen kann die vorhergehende Meldung gelesen werden.


Um eine Alarmnachricht zu löschen, drücken Sie . Dies ermöglicht Ihnen, zum vorher angezeigten Bildschirm zurückzukehren. Wenn die Alarmbedingungen weiter bestehen, wird der Alarm wieder ausgelöst.

Hinweis: Die Alarme »Stromausfall« und »Alarmfehler« können durch Drücken von  gelöscht werden.




Stummschalten des Alarms

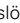Um den Alarm zwei Minuten lang auszuschalten, drücken Sie  einmal. Falls der auslösende Zustand weiterhin besteht, ertönt der Alarm nach zwei Minuten erneut.


Um den Alarm erneut zu aktivieren, drücken Sie  ein zweites Mal. Die Alarm-LED bleibt so lange aktiv, wie der Alarmzustand besteht.




Anzeigen der Alarmliste


Um die Liste der Alarmmeldungen anzuzeigen, gehen Sie zum Behandlungsbildschirm und drücken Sie , bis »Behandlungsbildschirm 3« angezeigt wird.


Monitoring-Bildschirme

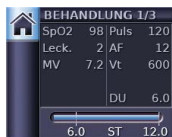

werden während der Therapie angezeigt. Echtzeitdaten hinsichtlich Therapiedruck, Maskenleckage und Oximetriedaten (bei Verwendung eines Oximeters) werden angezeigt.*

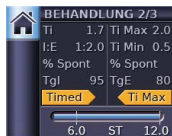

Um zwischen den Monitoring-Bildschirmen zu wechseln, drücken Sie .

Drücken der Start-/Stopptaste  beendet die Therapie.


Tipp: Stromsparmmodus durch 3 Sekunden halten.



Je nach Systemkonfiguration erscheint ein anderer Bildschirm, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Im Beispiel: VPAP ST-A™ mit

- H5i Atemluftbefeuchter
- beheizbarem ClimateLine Atemschlauch
- Climate Control – Auto

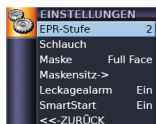

Setup-Menü



gibt Ihnen u.a. die Möglichkeit, die Komforteinstellungen zu optimieren und den Masken- bzw. Schlauchtyp zu ändern. Es werden ausschließlich relevante Einstellungen angezeigt.

Es können je nach Voreinstellungen im Setup-Menü die folgenden Einstellungen aufgerufen werden: Schlauch, Climate Control, Maske, Maskensitz, EPR-Stufe, Leckagealarm und SmartStart™.

* Hinweis: Der Messbalken am unteren Bildschirmrand zeigt den Istdruck.

Maskenanlegefunktion



Die Maskenanlegefunktion hilft Ihnen, die Maske richtig anzulegen. Zum Starten  mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, nachdem die Maske angelegt wurde. Zum Beenden  drücken.

Befeuchter H5i™ mit Climate Control und ClimateLine™




Der zur S9 Serie passende Befeuchter H5i hat mit Climate Control ein »intelligentes« System, das den H5i und den beheizbaren Schlauch ClimateLine oder ClimateLine MAX™ überwacht, um die Temperatur und den Befeuchtungsgrad während der Therapie konstant und angenehm zu halten.




ClimateLine™ Setup

1. Die Gummiabdeckung von der Rückseite des H5i entfernen.
2. Den ClimateLine- oder ClimateLine MAX-Schlauch auf dem ClimateLine-Anschluss so ausrichten, dass das Sperrsymbol nach oben zeigt. Den Schlauch fest in den Luftauslass drücken.
3. Den Schlauch im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.
4. Die Maske an das freie Ende des Schlauches anschließen.

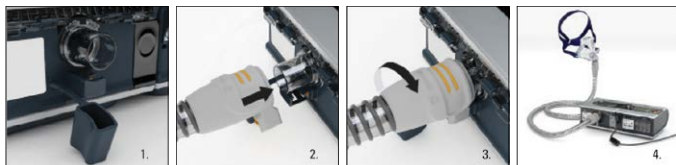

Hinweis: Wenn die Temperatureinstellung ausgeschaltet ist, erwärmt weder der Schlauch die Luft noch der Atemluftbefeuchter das Wasser, somit wird keine Feuchtigkeit an die Luft abgegeben.

Rückseite des Geräts

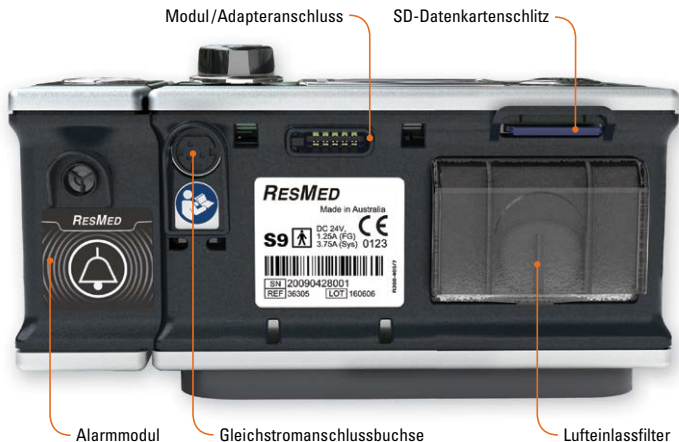

Hersteller: ResMed Ltd.
 1 Elizabeth Macarthur Drive
 Bella Vista NSW 2153 Australia

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0,
 Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de

Vertrieb durch: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **[EC REP]** ResMed (UK) Ltd.
 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Informationen zu weltweiten Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter www.resmed.com. ClimateLine, ClimateLine MAX, H5i, SmartStart und VPAP ST-A sind Marken der ResMed Ltd. und sind beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. © 2013 ResMed Ltd. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.