




## Mundstück-Beatmungseinstellungen

Für die Mundstückbeatmung mit dem Astral Beatmungsgerät werden die folgenden Einstellungen empfohlen. Diese Anleitung soll als Ergänzung zum Astral Klinischen Handbuch genutzt werden.

Einstellung	Beschreibung	Detail/Erläuterung
Beatmungszugang	ResMed EasySpeak Mundstück, 15 mm, ohne Luftauslassöffnung, mit Tubusverlängerung.	
Schlauchsystem	Einschlauchsystem mit Expirationsventil.	
Beatmungsmodus	V(A)C	Im V(A)C-Modus kann der Patient Atemzüge „ansammeln“, während mit jedem Atemzug ein festgelegtes Volumen abgegeben wird.
Parametereinstellungen	Vt, Trigger, Flowkurve	Werden im Hinblick auf Komfort und Präferenz des Patienten eingestellt.
PEEP	AUS	Während der Ausatmung löst sich der Patient häufig vom Mundstück.
Weitere Alarme	AUS	

### Mundstück-Konfiguration 1


Die folgenden Einstellungen eignen sich für Patienten, die eine durch einen Apnoealarm abgesicherte Beatmung benötigen. In diesem Fall muss der Patient spontan atmen können.

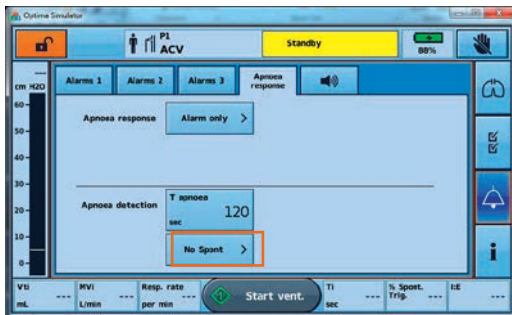

Parameter	Einstellung
Atemfrequenz	AUS
Apnoe-Reaktion	Nur Alarm
Apnoe-Detektion	T Apnoe Kein Spont.

### Mundstück-Konfiguration 2

Die folgenden Einstellungen eignen sich für Patienten, die eine intermittierende Beatmung benötigen. Hier wird eine Hintergrund-(Back-up)Frequenz mit einer voreingestellten Frequenz eingestellt.

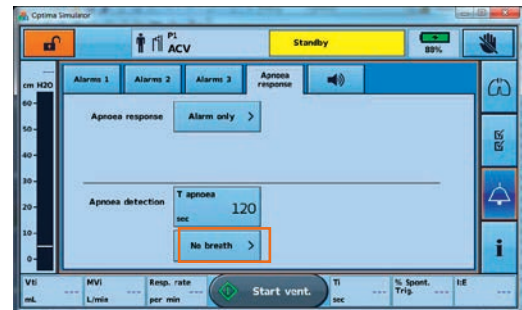

Parameter	Einstellung
Atemfrequenz	Beliebiger Wert außer „Aus“
Apnoe-Reaktion	Nur Alarm
Apnoe-Detektion	T Apnoe Kein AZ

### ⚠️ WARNUNG

Diese Konfiguration löst keinen Apnoealarm aus. Das Astral Beatmungsgerät erkennt nicht, wenn das Schlauchsystem vom Patienten getrennt wird.

### Bestellinformation



	Produktname	Artikelnummer
1.	EasySpeak Mundstück mit 17 cm Flexischlauch 22F	21353
2.	EasySpeak Mundstück für 15M Anschluss	21351
3.	EasySpeak Mundstück für 22M/15F Anschluss	21354