

LUNA[®]

Schlafapnoe-Gerät (Kurz-Gebrauchsanweisung)

Einstellen der Uhrzeit

 oder  drücken, bis die richtige Uhrzeit angezeigt wird.

Einstellen des Weckers

 1 sec. lang gedrückt halten. Die LED-Anzeige auf der Taste leuchtet konstant grün.
Das Gerät ist in Betrieb!

Taste  so oft drücken, bis die LED-Lampe für die Weckzeit-Anzeige  leuchtet.

 drücken: die Weckfunktion ist aktiviert.

 drücken: Weckzeit blinkt im Display auf.

 oder  drücken, bis die gewünschte Weckzeit angezeigt wird.

 drücken: die Weckzeit wird gespeichert.

 drücken deaktiviert die Weckfunktion.

Einschalten

 1 sec. lang gedrückt halten. Die LED-Anzeige auf der Taste leuchtet konstant grün.
Das Gerät ist in Betrieb.

Einstellen der Rampenfunktion

 1 sec. lang gedrückt halten. Die LED-Anzeige auf der Taste leuchtet konstant grün.

 oder  drücken, bis die gewünschte Rampenzeit angezeigt wird.

Rampenzeit während des Laufes ändern.

 oder  drücken, um gewünschten Wert einzustellen. Dräger LUNA[®] startet erneut mit der neu eingestellten Rampe.

Manuelles Beenden der Rampenfunktion

 1 sec. lang gedrückt halten. Die LED-Anzeige auf der Taste leuchtet nicht mehr.

Ausschalten

 1 sec. lang gedrückt halten. Die LED-Anzeige auf der Taste erlischt. Das Gerät ist außer Betrieb.

Was ist was:

Draufsicht

- 1 EIN/AUS-Taste
- 2 Betriebs-LED
- 3 Taste zum Reduzieren von Werten
bzw. auswählen von Parametern Menü abwärts
- 4 Taste zum Erhöhen von Werten
bzw. auswählen von Parametern Menü aufwärts
- 5 Display
- 6 LEDs für Sperrfunktion
- 7 LED für Weckerfunktion
- 8 LED für Betriebsdruck
- 9 LED für Betriebszeit
- 10 Taste zum Einstellen des Betriebsmodus
- 11 Rampenfunktions-LED
- 12 Taste zum Aktivieren/Deaktivieren der
Rampenfunktion
- 13 Patienten-Luftauslass

