




BOY® N

Kompressor

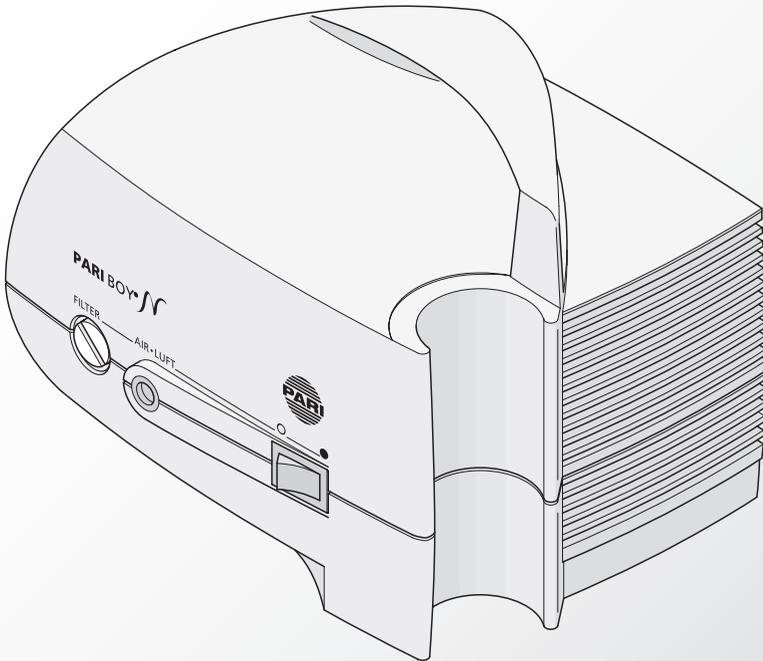

CE 0123



(D) Gebrauchsanweisung

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme.
Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

Information


Der PARI BOY N Kompressor ist in Kombination mit einem PARI Vernebler ein hocheffektives Inhalationsgerät für die Inhalationstherapie der unteren Atemwege mit Medikamentenaerosolen sowie zur topischen Inhalationsanästhesie. Der PARI BOY N Kompressor kann mit allen PARI Verneblern (außer PARI LC PLUS UNIVERSAL) betrieben werden.





Vor der Behandlung von Erkrankungen hat in jedem Fall eine ärztliche Untersuchung zu erfolgen. Es dürfen nur Medikamente verwendet werden, die von Ihrem Arzt verordnet oder empfohlen wurden.

Bitte prüfen Sie, ob folgende Komponenten vollständig in Ihrem PARI BOY N enthalten sind:

- PARI BOY N Kompressor (1)
- PARI Vernebler (2) inkl. Mundstück und Maske
- LC Verlängerungsring (3)
- Anschlussschlauch (4)
- Netzleitung (5)

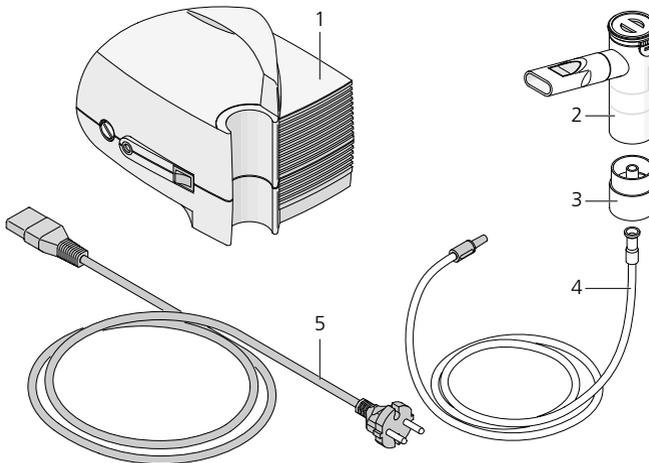

Information

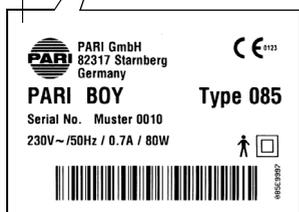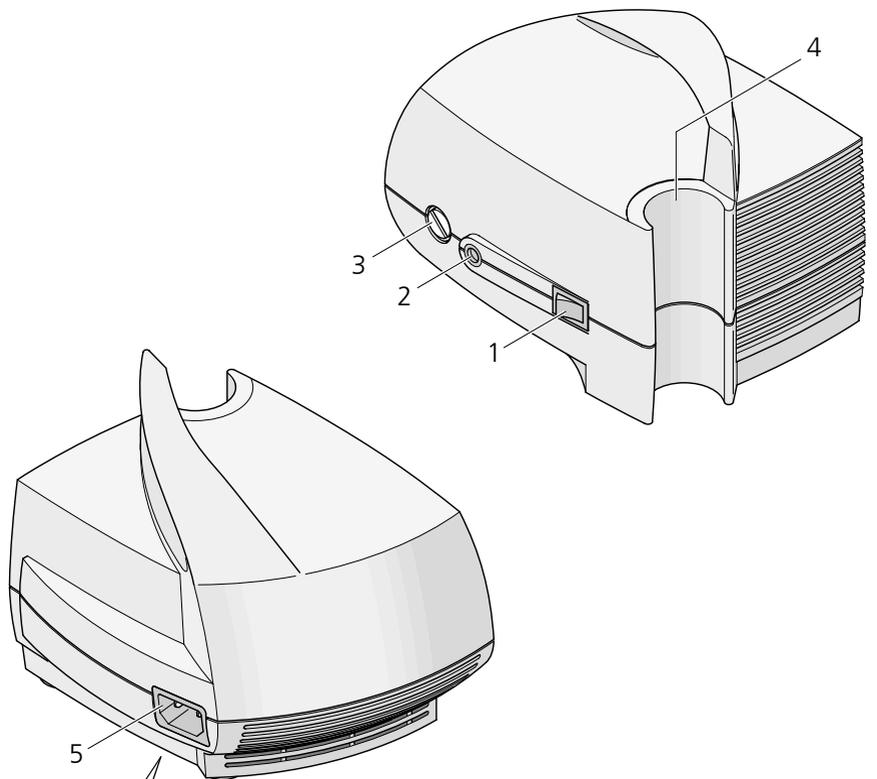



- 1 Ein/Aus Schalter
- 2 Schlauchanschluss
- 3 Filter
- 4 Halterung für Vernebler
- 5 Netzanschlussbuchse
- 6 Typenschild (an der Geräteunterseite)

Inbetriebnahme

- Stellen Sie den PARI BOY N Kompressor auf eine flache und stabile Oberfläche.



Achten Sie darauf, dass die seitlichen Lüftungsschlitze frei bleiben. Decken Sie das Gerät auf keinem Fall während des Betriebes ab. Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der Angabe auf dem Gerät übereinstimmt.

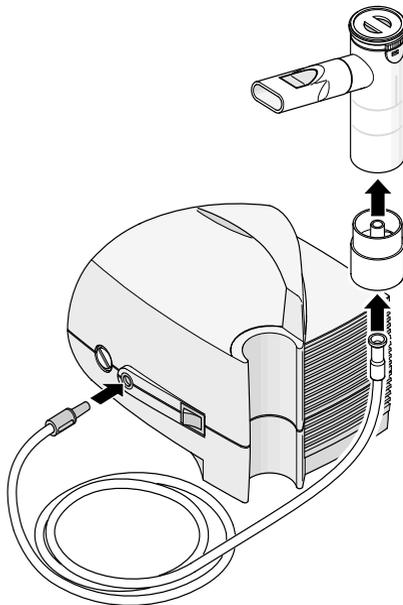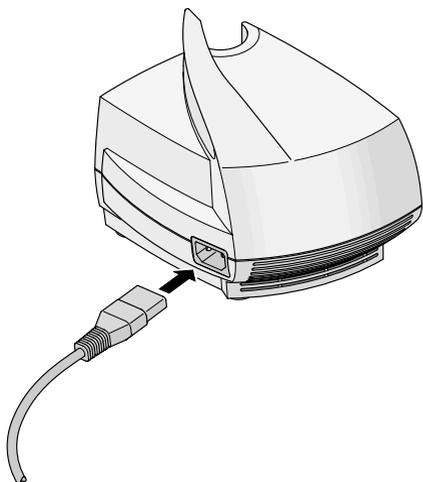


- Stecken Sie den Netzstecker in die Buchse an der Geräterückseite und anschließend in eine geeignete Steckdose.
- Stecken Sie den Adapter des Anschlussschlauches mit leichter Drehung in den Luftanschluss des Kompressors. Schließen Sie das andere Ende an den PARI LC Verlängerungsring an. Auf diesen kann dann der Vernebler leicht aufgesteckt werden. Zur leichteren Handhabung kann der LC Verlängerungsring auf dem Schlauch aufgeseckt bleiben.



Stellen Sie sicher, dass die Schlauchanschlüsse fest am Kompressor und am Vernebler stecken.

Inbetriebnahme

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Verneblers vollständig durch und betreiben Sie den Vernebler wie dort beschrieben.

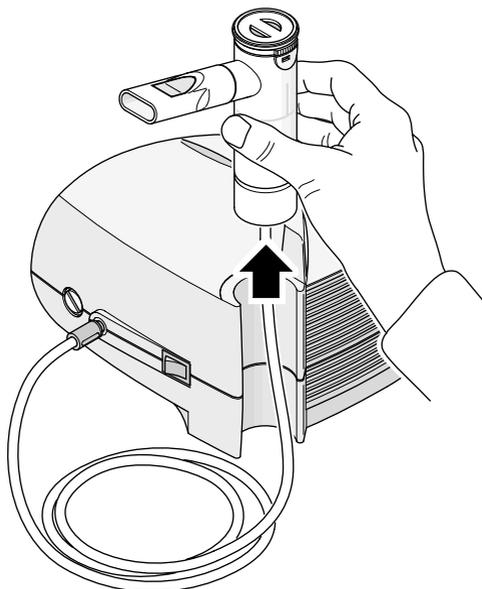

- Ziehen Sie den Vernebler vor der Behandlung nach oben aus der Halterung heraus.
- Starten Sie den Kompressor mit dem Ein-/Aus-Schalter.
- Setzen Sie den Vernebler nach der Behandlung wieder zurück in seine Halterung.



Warnung:

Um eine Gesundheitsgefährdung (z.B. eine Infektion) zu vermeiden, lesen Sie bitte auch das Kapitel „Hygiene“ in der Gebrauchsanweisung der jeweils verwendeten PARI Vernebler.


Weiterhin ist es wichtig, dass Sie die nachstehenden Ausführungen zu „Reinigung“ und „Filterwechsel“ in dieser Gebrauchsanweisung beachten.

Reinigung



Schalten Sie vor jeder Reinigung den Kompressor aus und ziehen Sie die Netzleitung aus der Steckdose.

- Wischen Sie die Außenfläche des Gehäuses Ihres PARI BOY N Kompressors mit einem feuchten Tuch ab.

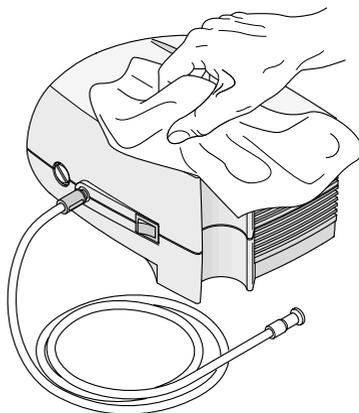

Sprühen Sie keine Flüssigkeit in die Lüftungsschlitze! Eindringene Flüssigkeiten können eine Beschädigung der Elektrik sowie anderer Kompressorteile verursachen und zu einer Funktionsstörung führen.

Ist Flüssigkeit in den Kompressor eingedrungen, setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Fachhändler oder mit dem PARI Service Center in Verbindung (Tel.: +49-8151-279279 oder info@pari.de). Benutzen Sie Ihren PARI BOY N Kompressor erst nach deren Anweisung wieder bzw. nachdem eine Untersuchung und eventuell notwendige Reparaturen durch Ihren autorisierten Fachhändler oder dem technischen Service der PARI GmbH ausgeführt worden sind.

Je nach Umgebungsbedingungen kann sich in dem Vernebler-Anschlussschlauch während des Inhalierens Kondenswasser absetzen. Um eine einwandfreie Therapie gewährleisten zu können, ist die Feuchtigkeit unbedingt zu entfernen. Dazu gehen Sie bitte in folgenden Schritten vor:

- Ziehen Sie den Schlauch vom Vernebler ab.
- Reinigen Sie den Vernebler gemäß dessen Gebrauchsanweisung.
- Lassen Sie den Schlauch im Kompressor eingesteckt.
- Lassen Sie den Kompressor so lange laufen, bis der eventuelle Feuchtigkeitsniederschlag beseitigt ist.

Filterwechsel

Der Filter in der Frontplatte Ihres PARI BOY N Kompressors muss bei normalen Betriebsbedingungen alle 500 Betriebsstunden, mindestens jedoch einmal im Jahr ausgewechselt werden.


Überprüfen Sie bitte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen (nach jeder 10. bis 12. Inhalation) den Filter. Ist er verschmutzt (Grau- oder Braunfärbung) oder verstopft, tauschen Sie ihn aus. Sollte der Filter feucht geworden sein, muss er ebenfalls gegen einen neuen Filter ausgetauscht werden.

Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wieder zu verwenden!

Benutzen Sie ausschließlich den Original PARI Filter, da sonst Ihr PARI Kompressor beschädigt werden könnte oder keine ausreichende Therapie sichergestellt werden kann.

Tauschen Sie den Filter folgendermaßen aus:

- Schrauben Sie den Filterhalter mit einer passenden Münze entgegen dem Uhrzeigersinn aus Ihrem PARI BOY N.

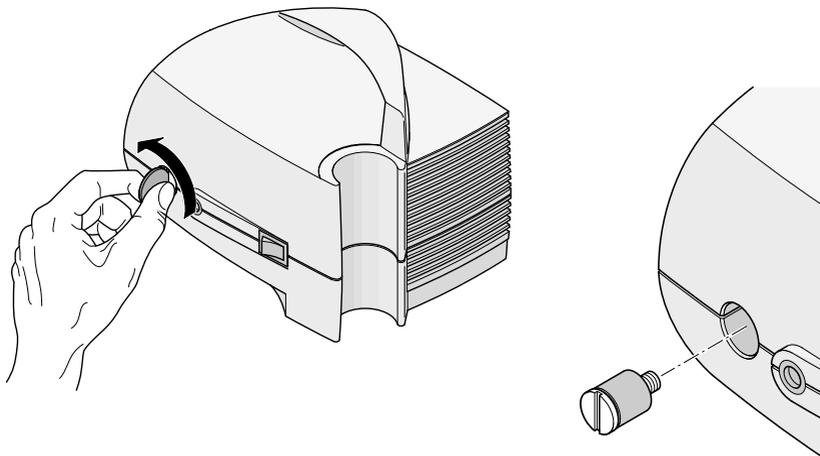

- Setzen Sie den Filterhalter zusammen mit dem neuen Filter in Ihren PARI BOY N ein und schrauben Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn mit einer Münze fest.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	230V~ / 50Hz
Gehäuseabmessungen (B x H x T):	19,2cm x 14,5cm x 15cm
Gewicht:	1,7 kg

Zeichenerklärung:



Ein/Aus



Wechselstrom



Typ B



Gerät der Schutzklasse II



- Achtung, Gebrauchsanweisung einsehen
- Warnung



Aus Gründen des Umweltschutzes und im Interesse der Rohstoffrückgewinnung sollte das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt, sondern bei der Sammelstelle für Elektrogeräte abgegeben werden.

Wichtige Hinweise

Der PARI BOY N Kompressor ist ein elektrisch betriebenes Gerät. Er darf weder unbeaufsichtigt noch in explosionsgefährdeten Bereichen und Feuchträumen betrieben werden. Jede Handhabung des Gerätes setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus. Die Haftung für die sichere Funktion des Gerätes geht in jedem Fall auf den Betreiber über, wenn eine Handhabung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht. Instandsetzung des Gerätes nur durch uns oder eine von uns ausdrücklich dazu ermächtigte Service-Stelle. Bei Reparaturen durch von uns ermächtigte Stellen ist von diesen eine Bescheinigung über Datum, Art und Umfang der Reparatur sowie Firmenangabe und Unterschrift zu fordern. Zum Betrieb des Gerätes darf nur Original PARI-Zubehör verwendet werden.


Wichtige Hinweise

Die PARI GmbH haftet nicht für Schäden oder Funktionsstörungen, die auf unsachgemäßer oder bestimmungsfremder Handlung des Betreibers beruhen.

Zur vollständigen Trennung vom Netz ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.

Technische Änderungen vorbehalten.

Transport und Lagerung bei:

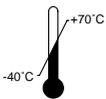

Umgebungstemperatur -40°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

RH
10% - 100%

Relative Luftfeuchtigkeit 10% bis 100%

P
500hPa-1060hPa

Atmosphärischer Druck 500hPa bis 1060hPa

Garantiebedingungen

Während der Garantiezeit beseitigen wir oder unser Kundendienst Fabrikations- oder Materialfehler am Kompressor unentgeltlich. Ein Anspruch auf Wandlung, Minderung oder Rücktritt besteht nicht. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung des Gerätes entstehen, fallen nicht unter diese Garantie. Die Garantie erlischt bei Eingriffen am Gerät durch hierzu nicht befugte Stellen. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird im Rahmen der Garantie nicht gewährt.

Sollten Sie eine Reklamation haben, bringen Sie bitte das vollständige Gerät zu Ihrem Fachhändler oder schicken Sie es uns im Originalkarton verpackt und frankiert mit dem vom Fachhändler abgestempelten Garantieschein ein.

Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantiefrist läuft ab Kaufdatum.

Garantieschein für PARI BOY N **Certificate of Guarantee for PARI BOY N**

Bar code label

Geräte Nr.
Appliance No.

Für dieses Gerät gewähren wir 3 Jahre Garantie. Die Garantiefrist läuft ab Kaufdatum. Während der Garantiezeit beseitigen wir oder ein von uns autorisierter Kundendienst Fabrikations- und Materialfehler unentgeltlich. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung des Gerätes entstehen, fallen nicht unter die Garantie. Die Garantie erlischt bei Eingriffen am Gerät durch hierzu nicht befugte Stellen. Ein Anspruch auf Wandlung, Minderung oder Rücktritt besteht nicht. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt. Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Sollten Sie eine Reklamation haben, bringen Sie bitte das vollständige Gerät zu Ihrem Fachhändler oder schicken Sie es uns gut verpackt und frankiert mit diesem Garantieschein ein.

We grant a 3 year guarantee on this appliance, commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we or an authorised customer service point will repair, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in material or workmanship. Damage arising from improper use of the appliance is not covered by this guarantee. The guarantee shall become void if repairs are undertaken on the appliance by unauthorised persons. The owner shall not be entitled to cancel the sale or demand a partial or full refund of the purchase price. No compensation will be paid for consequential or direct damage. Wearing parts are excluded from the guarantee.

In the event of a claim under this guarantee, please bring the complete appliance to your dealer or send it to us, well packed and postage paid, together with this certificate of guarantee.

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation

D-82317 Starnberg

Kaufbestätigung: Das Gerät mit der obigen Gerätenummer wurde von uns original verpackt verkauft.

Confirmation of purchase: The appliance with the above appliance number was sold in its original packaging.

Kaufdatum/Purchase date

Stempel und Unterschrift des Fachhändlers/stamp and signature of the dealer

Spezialisten für effektive Inhalation



Moosstrasse 3 • D-82319 Starnberg • Germany
Tel.: +49 (8151)279-279 • Fax: +49 (8151)279-101
e-mail: info@pari.de • www.pari.de