


## Produktbeschreibung

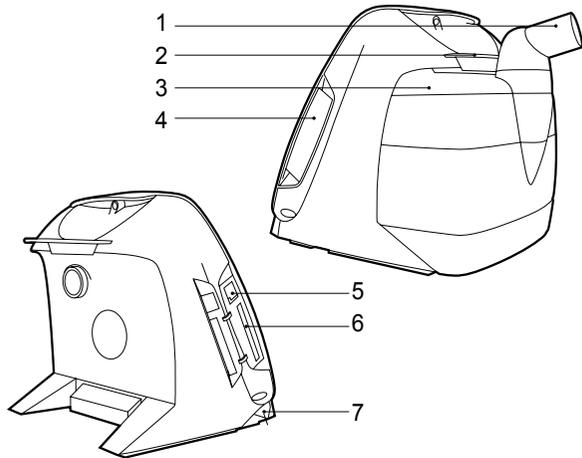


NR.	GEGENSTAND	NR.	GEGENSTAND
1	Luftauslass	4	Lufteinlass
2	Sperre hintere Abdeckung	5	Datenanschluss
3	Luftbefeuchter HA 01 (optional)	6	Steckplatz für Speicherkarte
		7	DC-Anschluss

## Symbole des Menüs


SYMBOL	ERLÄUTERUNG
	Das iSleep ist in Betrieb
	Weckalarm
	Luftbefeuchter HA 01 aktiv
	Rampe ein
	Bedienfeldsperrung (Heimmodus)
	Bedienfeldsperrung (Heimmodus) durch die PC-Software des Breas iSleep

## Shortcuts

Aktivierung/Deaktivierung der Rampenfunktion während des Betriebs des iSleep: Drücken Sie die Taste Rampe und halten Sie sie gedrückt, bis das Symbol Rampe erscheint/verschwindet.

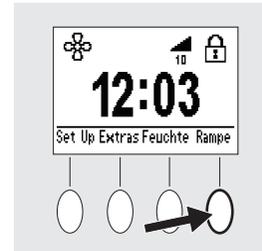

Aktivierung/Deaktivierung des Luftbefeuchters während des Betriebs des iSleep: Drücken Sie die Taste Feuchte und halten Sie sie gedrückt, bis das Symbol Feuchte erscheint/verschwindet.

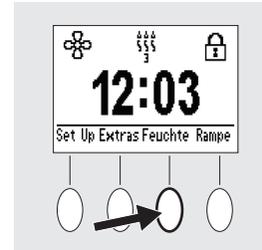

## Überprüfung des iSleep vor der Inbetriebnahme

1. Schließen Sie ein gereinigtes oder neues Patientenschlauchsystem an das iSleep an.
  2. Schließen Sie das iSleep an die Netzsteckdose an.
  3. Schalten Sie das iSleep ein, indem Sie den Start/Stopp-Schalter vorn am Bedienfeld betätigen. Stellen Sie sicher, dass das iSleep in Betrieb ist.
  4. Legen Sie die Maske an und überprüfen Sie den korrekten Sitz.
  5. Stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen vorschriftsmäßig vorgenommen wurden.
- Das iSleep ist nun einsatzbereit.

Breas Medical AB, Företagsvägen 1,  
SE-435 33 Mölnlycke, Sweden,  
Tel: +46 31 86 88 00, Fax.: +46 31 86 88 10,  
breas@breas.com  
Finden Sie Ihren lokalen Fachhändler  
unter [www.breas.com](http://www.breas.com)



iSleep<sup>®</sup>  
by Breas



# iSleep 20+/20i/22/25 Kurzanleitung

Doc. 004456 De X-2

## Kurzanleitung


Wir freuen uns, dass Sie sich für ein iSleep-Produkt entschieden haben. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind die iSleep-Produkte für die Therapie zu Hause vorgesehen, um einen positiven Atemwegsdruck aufrechtzuerhalten. Anhand dieser Kurzanleitung können Sie sofort mit der Therapie beginnen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem abgebildeten Modell um das iSleep 20+ handelt; beim iSleep 20i/22/25 kann das Display etwas anders aussehen.




**Diese Kurzanleitung ist keine komplette Gebrauchsanweisung für das iSleep. Die kompletten Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

### Ein- und Ausschalten


1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung angeschlossen ist.

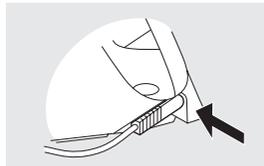

2. Schalten Sie das iSleep ein/aus, indem Sie den Start/Stop-Schalter 2 sek lang betätigen.

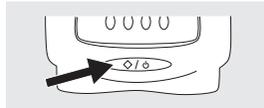

### Arbeiten mit dem Menü

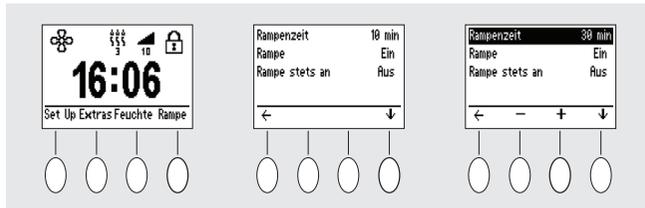

Mit den vier Tasten unter dem Display navigieren Sie im Menü. Sie können die Therapieeinstellungen (Set Up) ansehen und die Geräteeinstellungen sowie die Einstellungen für den Wecker, den Luftbefeuchter und die Rampe jeweils Ihrer Therapie anpassen. Je nach der Position im Menü haben die Tasten verschiedene Funktionen. Es werden folgende Symbole verwendet:

#### SYMBOL ERLÄUTERUNG



Gewählten Wert erhöhen oder eine Funktion aktivieren.



Gewählten Wert reduzieren oder eine Funktion deaktivieren.

#### SYMBOL ERLÄUTERUNG



Eine Menüebene nach oben.




Menü öffnen oder den unten angegebenen Wert auswählen.

### Speicherkarte




Das iSleep kann nur Daten zur Speicherkarte kopieren und übertragen, wenn es im Standby-Modus ist (nicht in Betrieb).


1. Stecken Sie die Speicherkarte in den entsprechenden Schlitz an der Seite des iSleep.

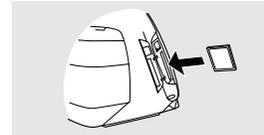


2. Im Hauptmenü wählen Sie „Extras“, um in den Bereich „Speicherkarte“ zu gelangen.

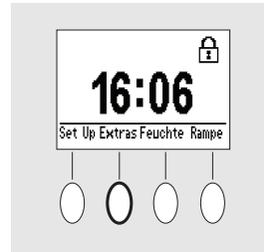

3. Wählen Sie die gewünschte Aktion und warten Sie, während das iSleep Daten auf die Speicherkarte lädt oder speichert.

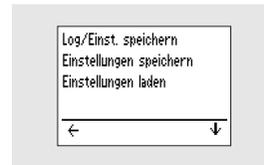


4. Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Schlitz an der Seite des iSleep.

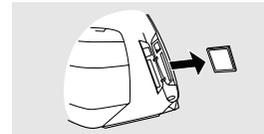

### Snooze-Funktion

1. Betätigen Sie den Start/Stop-Schalter kurz.
2. Die Snooze-Funktion wird aktiviert, und das iSleep liefert für einen Zeitraum einen niedrigen Flow.

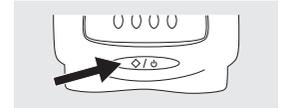



Möchten Sie die Behandlung fortsetzen, atmen Sie durch die Maske oder drücken Sie kurz den Start/Stop-Schalter.

### Wecker

Gehen Sie zum Fenster „Weckalarm“, um den Weckalarm ein- und auszuschalten.


Die Weck-Funktion löst, wenn sie aktiviert ist, zur Weckzeit einen Alarmton aus.

Bei Ertönen des Alarms drücken Sie den Start/Stop-Schalter, um den Alarm abzuschalten.

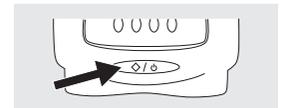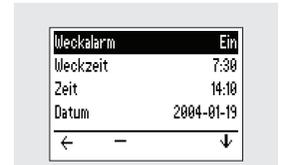

### Reinigung und Austausch des Patienten-Luftfilters

Der Patienten-Luftfilter befindet sich seitlich am iSleep.

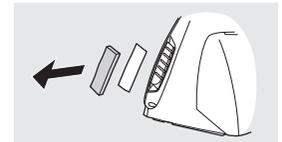

Es gibt zwei Arten von Filtern:

#### Waschbarer Filter (grau, obligatorisch)

Erneuern Sie den Filter mindestens einmal jährlich. Waschen Sie den Filter mindestens einmal wöchentlich.

#### Einwegfilter (weiß, optional)

Erneuern Sie den Filter mindestens alle vier Wochen und bei hoher Luftverschmutzung oder pollenreicher Umgebung häufiger.